

Linget'Anios

NETTOYANTES
ET DÉSINFECTANTES

INDICATIONS

Les LINGET'ANIOS sont imprégnées d'une solution nettoyante et désinfectante, pour le traitement des surfaces et des dispositifs médicaux entre deux patients, ainsi que pour le nettoyage et la désinfection de la peau saine en l'absence de point d'eau. Agréablement parfumées.

COMPOSITION

Ethanol (N° CAS 64-17-5 : 406,8 mg/g), digluconate de chlorhexidine (N° CAS 18472-51-0 : 1,1 mg/g), parfum de synthèse, excipients.

MODE D'EMPLOI

Lingette à usage unique prête à l'emploi.
Appliquer la lingette ANIOS sur la zone à traiter. Laisser agir 5 à 15 minutes selon l'activité antimicrobienne recherchée. Ne pas rincer. Répéter l'application chaque fois que nécessaire ou se référer au plan d'hygiène en place.
Bien refermer l'emballage après chaque ouverture.
Ne pas réutiliser la lingette. La désinfection ne pourrait plus être garantie.

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

La solution d'imprégnation LINGET'ANIOS est :

- Limpide incolore
- Densité à +20°C : $\approx 0,934$
- pH : ≈ 6

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

La solution d'imprégnation des LINGET'ANIOS est :

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1040, EN 1276	5 min.
Levures	EN 1275, EN 1650	5 min.
Virus	HIV-1, Herpès virus	1 min.
	HBV	15 min.



CONDITIONNEMENTS

- La grande boîte distributrice avec recharges de 120 lingettes de 140 x 190 mm

Carton de 1 boîte + 3 recharges Réf : 299.303

Carton de 1 boîte + 6 recharges Réf : 299.306

Carton de 12 recharges Réf : 299.312

Carton de 12 boîtes de 120 lingettes..... Réf : 299.421

- La petite boîte distributrice de 120 lingettes de 70 x 100 mm

Carton de 12 boîtes de 120 lingettes..... Réf : 299.411

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Stockage entre +5°C et +25°C.

Produit biocide destiné à l'hygiène humaine et à la désinfection des surfaces (Groupe 1-TP 1 & 2) - usage réservé aux professionnels.